

Varianten der Testdurchführung

Achtung: Teststab bitte erst unmittelbar vor Testdurchführung aus der Folienverpackung entnehmen.

Variante DIREKT



Abb. 1

Halten Sie den viola-Test einfach für ca. 3 Sekunden direkt in den Urinstrahl. (Siehe Abb. 1)

Variante BECHER



Abb. 2

Halten Sie die Öffnung für die Urinprobe für ca. 3 Sekunden in den gesammelten Urin. (Siehe Abb. 2)

ACHTUNG: Maximale Eintauchtiefe beachten!




Die Wartezeit für beide Varianten

Legen Sie den viola-Test für 10 Minuten auf die Folienverpackung.

Wie Sie den viola-Test auswerten und weitere Informationen finden Sie auf der Rückseite.


Menopausetest

DIE AUSWERTUNG

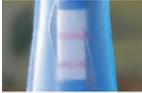

Erscheinen 2 violette Linien im Ergebnisfeld und ist die untere Linie gleich oder intensiver als die obere Linie, dann **haben Sie ein positives Testergebnis.**

*Wiederholen Sie den Test mit dem zweiten Teststab nach genau einer Woche. Nur falls **beide Tests** ein positives Ergebnis zeigen, können Sie davon ausgehen, sich in der Postmenopause zu befinden.*

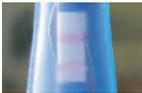

Erscheinen 2 violette Linien im Ergebnisfeld und ist die obere Linie deutlich intensiver als die untere Linie, bedeutet dies, daß der Test richtig durchgeführt wurde, aber **Sie sich nicht in der Postmenopause befinden.**

Das gleiche gilt, wenn nur eine Linie erscheint. In diesem Fall brauchen Sie den zweiten Teststab nicht und können ihn entsorgen.



Der Test wird als **UNGÜLTIG** gewertet, wenn im Ergebnisfeld nach 10 Minuten **keine** violette Linie erscheint. Mögliche Gründe für ein ungültiges Resultat könnten eine beschädigte Folienverpackung, falsche Lagerung oder ein Anwendungsfehler sein. Bitte heben Sie in diesem Fall alle Testmaterialien auf und wenden Sie sich an CARE diagnostica.

Nach 15 Minuten kann das Testergebnis nicht mehr sicher ausgewertet werden.

BITTE BEACHTEN SIE:

Dieser Test ist ein immunologischer Test zum Nachweis von humanem follikelstimulierendem Hormon (FSH) im Harn. Ein dauerhafter Anstieg von FSH im Harn bedeutet, dass Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Ihre Postmenopause erreicht haben. Bei den eingesetzten Testmaterialien (z.B. Antikörper) handelt es sich um potentiell infektiöse Materialien, von denen jedoch keine Gefahr ausgeht, wenn Sie alle Testbestandteile gemäß der Gebrauchsanweisung verwenden.

INFORMATION

Lesen Sie bitte die beidseitige Gebrauchsanweisung gewissenhaft durch, bevor Sie den Test durchführen.

Zu Ihrer Information:

Bin ich schon in den Wechseljahren? Mit diesem Test können Sie sicher erkennen, ob Ihre Menopause schon eingetreten ist. Die Menopause findet rund um das 50. Lebensjahr statt. Die Phase nach der letzten Monatsblutung bezeichnet man dann als Postmenopause.

Für das Eintreten in die Wechseljahre ist im Wesentlichen eine Umstellung der Hormonproduktion verantwortlich. Dadurch kommt es auch zu den typischen Symptomen der Wechseljahre, wie z.B. Hitzewallungen, Scheidenjucken, Schweissausbrüche, Schlafstörungen, Depressionen, Herzbeschwerden, Nachlassen der sexuellen Lust, Trockenheit der Augen, Gelenkschmerzen oder Darmträgheit.

Dieser Test untersucht das Vorhandensein des Hormons FSH (follikelstimulierendes Hormon). Dessen Spiegel im Harn schwankt vor der Postmenopause zwischen 10 und 20 IU/L (Internationale Units pro Liter). Nach der Menopause steigt die Konzentration über 25 IU/L und bleibt dann während der Postmenopause dauerhaft erhöht.

Sie können mit diesem Test erkennen, ob Ihr FSH-Spiegel über 25 IU/L liegt. Um nach einem positivem Test sicher zu gehen, dass dieser Wert auch dauerhaft vorliegt und Sie sich somit in der Postmenopause befinden, müssen Sie einen zweiten Test eine Woche nach dem ersten Test durchführen.

Zeitraum der Testdurchführung:

Sie können diesen Test jederzeit durchführen. Empfohlen wird jedoch der erste Morgenharn, weil darin die FSH-Konzentration am höchsten ist.

Weitere Hinweise:

Da die Postmenopause von vielen Faktoren beeinflusst wird, kann es in sehr seltenen Fällen zu falschen Ergebnissen kommen. Treffen Sie daher keine gesundheitsrelevanten Entscheidungen basierend auf diesem Test (z.B. Einnahme von Medikamenten), sondern wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Arzt.

Medikamente, die FSH enthalten, können einen verfälschenden Einfluß auf das Testergebnis haben. Ebenso wird der Test bei Verwendung von Urin von schwangeren Frauen falsche Ergebnisse zeigen.

Testkomponenten:

Testschachtel, Gebrauchsanweisung, 2 Folienverpackungen mit je 1 Teststab und Trockenmittel

Sie benötigen weiters:

eine Uhr mit Sekundenanzeige und eventuell einen sauberen Behälter



Gebrauchsanweisung beachten!
Test außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Test nach dem Ablaufdatum nicht verwenden.
Testkomponenten bei 4 bis 30°C lagern.
Test nur einmal verwenden.
Teststab nicht öffnen.
Test nur zur äußeren Anwendung.
In-vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung.



0483



CARE diagnostica
Römerstrasse 8
2513 Möllersdorf
E-Mail: mail@care.co.at
www.carediagnostica.at