

# **ORTHOVISC MINI**

## **ORTHOVISC Mini Fertigspritzen**

PZN: 06716484

Inhalt: 1 ml

Hersteller: Plasmaconcept AG

### **Zweckbestimmung**

Orthovisc und Orthovisc mini sind als viskoelastischer Zusatz oder als Ersatz für Synovialflüssigkeit in menschlichen Gelenken bestimmt. Orthovisc und Orthovisc mini sind zur Behandlung von Symptomen bei Synovialgelenk-Dysfunktionen, beispielsweise bei Osteoarthritis gut geeignet. Orthovisc und Orthovisc mini wirken dabei als Gleitmittel liefern mechanische Unterstützung.

### **Zusammensetzung**

Orthovisc mini wird als steriles viskoelastisches Präparat in einer Einmal-Glasspritze geliefert, die 1,0ml (geeignet für kleinere Gelenke) Natrium-Hyaluronat in einer physiologischen Kochsalzlösung gelöst enthält. Jeder ml Orthovisc und Orthovisc mini enthält 15mg Natrium-Hyaluronat, 9mg Natriumchlorid und steriles Wasser für Injektionen (nach USP). Orthovisc und Orthovisc mini werden steril filtriert und aseptisch abgefüllt. Bei unbeschädigter Spritze ist deren Inhalt steril. Orthovisc und Orthovisc mini müssen bei einer Temperatur von 2°C bis 25°C gelagert und für etwa 20-45 Minuten vor Gebrauch auf Zimmertemperatur erwärmt werden.