

Tearfid spray

Augenspray auf der Basis von Vitamin A
und E, Liposomen und Aminosäuren,
ohne Konservierungsstoffe

TEARFID Spray Augenspray auf der Basis von Vitamin A und E, Liposomen und Aminosäuren, ohne Konservierungsstoffe.

Beschreibung

TEARFID Spray ist ein steriles Produkt ohne Konservierungsstoffe, das Vitamin A und E, Liposome und Aminosäuren enthält.

TEARFID Spray stabilisiert die Lipidschicht des Tränenfilms und reguliert und korrigiert die Benetzung der Augenoberfläche.

Die Vitamine A und E sind bekannt für ihre beruhigenden und wohltuenden Eigenschaften und sorgen in Verbindung mit den Liposomen (hydriertes Phosphatidylcholin) für eine praktische Unterstützung der Lipidkomponente der Lidspalte. Darüber hinaus tragen die Vitamine A und E als Stabilisatoren der Liposomen zu einer Linderung der okulären und periokulären Symptomatik im Zusammenhang mit Entzündungszuständen durch eine Allergie und/oder Infektion bei.

Die im Produkt enthaltenen Aminosäuren L-Prolin, Glycin, L-Lysinhydrochlorid und L-Leucin verbessern die Benetzung der Augenoberfläche und können dazu beitragen, den Schutz des Epithels zu verbessern, das verschiedenen Belastungen ausgesetzt ist.

Die Lipidkomponente des Tränenfilms ist von entscheidender Bedeutung für die Rückhaltung der Tränenflüssigkeit und Kontrolle ihrer Verdunstung.

Mit **TEARFID Spray** wird die Funktion der Lipidsekretion der Anhangsorgane des Auges (Meibom-, Zeis- und Moll-Drüsen) unterstützt, was zur Stabilisierung der Lipidkomponente des Tränenfilms beiträgt.

Anwendungsgebiete

TEARFID Spray Das Medizinprodukt ist bei subjektiven Beschwerden im Zusammenhang mit einem Syndrom des trockenen Auges, wie beispielsweise ein Fremdkörpergefühl, Brennen und Jucken im Auge, bei einem Syndrom des trockenen Auges durch eine schlechte Qualität der Lipidschicht des Tränenfilms, Entzündungen des Augenlids (Blepharitis) oder Störungen indiziert, die eine okuläre oder periokuläre Rötung hervorrufen, wie es häufig bei Veränderungen bestimmter Umweltparameter vorkommt (Wind, Mikroklima, usw.).

Zusammensetzung

Retinylpalmitat (Vit. A), α -Tocopherol (Vit. E), hydrierte Phospholipide, monobasisches Natriumphosphat, dibasisches Natriumphosphat, Natriumchlorid, L-Prolin, Glycin, L-Lysinhydrochlorid und L-Leucin, und gereinigtes Wasser.

Gegenanzeigen

Bekannte Überempfindlichkeit gegen die Produktbestandteile oder andere, chemisch sehr ähnliche Substanzen.

Gebrauchsanweisung

1 bis 2 Sprühstöße **TEARFID Spray** auf das Auge sprühen. Dabei die Augenlider möglichst geschlossen halten. Es wird empfohlen, **TEARFID Spray** drei- bis viermal täglich anzuwenden. Bei schwerer Symptomatik kann **TEARFID Spray** auch öfter angewendet werden. Bei Augenschleim und dickflüssigem Sekret den okulären und periokulären Bereich des Auges mit sterilem medizinischen Einmalmull reinigen und anschließend 1 bis 2 Sprühstöße **TEARFID Spray** auf das Auge sprühen. Das Produkt in einem Abstand von 10 cm aufsprühen. **TEARFID Spray** kann auch bei aufgetragenen Kosmetika angewendet werden. In diesem Fall nur einen Sprühstoß aus größerer Entfernung (ca. 20 cm) aufsprühen. Beim erstmaligen Gebrauch wiederholt pumpen, bis der erste Sprühstoß austritt. Beim Gebrauch die Flasche senkrecht halten.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Bei gleichzeitiger lokaler Anwendung anderer Arzneimittel am Auge wenden Sie sich an Ihren Arzt
- Bei Beschädigung der Flasche das Produkt nicht verwenden
- Nach dem auf der Flasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden
- Dieses Produkt ist nur für die äußere Anwendung am Auge bestimmt
- Bei einer Temperatur von 4 bis 25 °C lagern
- Jeglichen Kontakt der Sprühpumpe mit dem Auge vermeiden
- Das Verschlucken geringer Mengen des Produkts ist unproblematisch

Nebenwirkungen

Es wurden keine unerwünschten Wirkungen nach Gebrauch des Produkts berichtet. Beim Auftreten von Nebenwirkungen das Produkt nicht mehr verwenden und einen Arzt aufsuchen. Nach Anwendung des Produkts kann es vorübergehend zu einem leicht verschwommenen Sehen kommen.

Datum der neuesten Version der Gebrauchsanweisung: rev 01 von 05-10-2017

STERIL A

8 ml

CE 0546 SOOFT italia S.p.A.

C.da Molino 17
63833 Montegiorgio (FM) Italien
Tel. +39 0734 964096
www.sooft.it

 **fidia**