



# Vaginal-Gel

## Medizinprodukt

**Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.**

SOS Vaginal-Gel gewährleistet eine schnelle Hilfe bei vaginaler Trockenheit. Das Gel bildet einen Schutzfilm, der die Haut vor weiteren Reizungen schützt und dabei hilft den natürlichen Feuchtigkeitshaushalt wiederherzustellen. Der Feuchtigkeitskomplex aus Hyaluronsäure und Glycerin wirkt natürlich befeuchtend und behandelt effektiv trockenheitsbedingte Schmerzen wie Brennen und Juckreiz. Ohne Hormone und Konservierungsstoffe.

SOS Vaginal-Gel ist für die innerliche und äußerliche Anwendung geeignet. Die 1 ml je Anwendung lassen sich einfach mit dem Präzisionsapplikator dosieren. Das Gel kann in akuten Fällen täglich und zur präventiven Behandlung alle 3 Tage angewandt werden.

### **Anwendungsgebiet:**

Gel zur Behandlung von vaginaler Trockenheit.

### **Anwendung:**

Seife, Lotionen und parfümierte Produkte können zu einer Verschlimmerung der vaginalen Trockenheit führen. Wenden Sie daher diese Produkte nicht mehr für die vaginale Hygiene, insbesondere im Inneren der Vagina, an.

Benutzen Sie den Applikator oder Ihre Finger um SOS Vaginal-Gel zu applizieren. Waschen Sie sich vor und nach der Anwendung die Hände.

Ein leicht kribbelndes Gefühl während der Applikation ist normal und verschwindet sehr schnell wieder.

Wie häufig Sie SOS Vaginal-Gel anwenden sollten, hängt vom Schweregrad der vaginalen Trockenheit ab.

Wir empfehlen die Verwendung des Gels alle drei Tage oder bei starker Trockenheit: täglich auftragen.

Nach 30 Tagen Applikation unterbrechen Sie bitte die Anwendung für 2 Tage.

Nehmen Sie die Kappe von der Tube und benutzen den Dorn auf der Oberseite der Kappe um das Siegel der Tube zu brechen.

Sie können für die Applikation des SOS Vaginal-Gels auf den beigelegten Spezialapplikator zurückgreifen:

Zu diesem Zweck schrauben Sie den Applikator auf die Tubenspitze.

Nach Benutzung des Applikators schrauben Sie diesen ab und waschen ihn unter lauwarmen Wasser ab.

Verschließen Sie die Tube entweder wieder mit großen Verschlussdeckel oder im Falle des aufgesteckten Applikators mit der kleinen Verschlusskappe.

### **Externe Applikation:**

Drücken Sie etwas Gel aus der Tube (ca. 1 ml um die Fingerspitze zu bedecken) auf Ihren Zeigefinger. Tragen Sie das Gel auf die Vaginalöffnung und das umliegende Gewebe auf.

### **Interne Applikation:**

Drücken Sie die Tube leicht bis etwas Gel an der Öffnung des Applikators erscheint. Führen Sie den Applikator ein und drücken Sie leicht auf die Tube. Die erforderliche Menge des Gels (1 ml) sollte groß genug sein, um Ihre Fingerspitze zu bedecken. Üben Sie die Anwendung mit dem Applikator vor dem Einführen.

### **Aktive Inhaltsstoffe:**

Hyaluronsäure, Glycerin, Betaine, Xanthan Gum, Pullulan.

### **Aufbewahrung:**

Das Gel sollte an einem sicheren und trockenen Ort bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.





Das Gel nicht nach Ablauf des oben an der Tube und auf der Packung angegebenen Verfalldatums verwenden.

#### **Sicherheitshinweise:**

Das Gel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bei Fragen oder Unklarheiten zu dem Produkt fragen Sie bitte Ihren Arzt und Apotheker.

Bei anhaltenden und wiederkehrenden Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

#### **Hinweise:**

SOS Vaginal-Gel ist geruchslos und enthält keine Konservierungsstoffe, Hormone, Silikone oder tierische Bestandteile. Die funktionalen Inhaltsstoffe sind Hyaluronsäure, Glycerol, Betain, Xanthan Gummi und Pullulan.

Diese Inhaltsstoffe dienen der Befeuchtung der vaginalen Mucosa (Schleimhaut).

Das Gel ist wasserlöslich, fettet nicht und hinterlässt keine Flecken.

SOS Vaginal-Gel hat keine bekannten Nebenwirkungen und kann parallel mit anderen Medikationen verwendet werden.

Allergische Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe sind selten.

Im Zweifel sollte etwas Gel auf die Innenseite des Unterarms aufgebracht und die Stelle eine Zeit lang beobachtet werden. Wenn sich nach der Behandlung eine juckende und gerötete Hautreaktion offenbart, sollte das SOS Vagina-Gel nicht verwendet werden.

#### **Inhalt:**

30 ml e Tube mit SOS Vaginal-Gel, Beipackzettel, Applikator



**Stand der Information:** Mai 2020



#### **Hersteller:**

TheOTCLab B.V.  
Fred. Roeskestraat 115  
1076 EE Amsterdam  
Niederlande

CE 0482

#### **Vertrieb:**

DISTRICON GmbH  
Am Joseph 15  
D-61273 Wehrheim

#### **Bedeutung der Symbole auf Packung:**



Hersteller



Temperaturbegrenzung



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Gebrauchsinformation beachten

408\_REV01/G01  
77248034\_20H1